

alluce
Valgo[®]
solution



Eine Socke als **Freund**

by Paolo Scettri



**ERHÄLTlich IN SANITÄTSFACH- UND
ORTHOPÄDIEFACHGESCHÄFTEN SOWIE APOTHEKEN**

Ein Medizinprodukt CE

Brevetto IT 1378837

Patent Pending EP 08720252, US 12/526546



I.S.P.E. snc

Via G. Galilei, 22

35030 Sarameola di Rubano

Padova - Italy



www.ispesolution.com



Alluce Valgo Solution®

Bei "Alluce Valgo Solution®" handelt sich um eine technologisch innovative Hallux-Socke, welche dazu entwickelt wurde, den Fuß zu stabilisieren und ihn bei seinen physiologischen Funktionen zu unterstützen.

- **Indikationen: Personen welche unter einem Hallux Valgus leiden oder dabei sind, einen solchen zu entwickeln.** Die Kraftlinien der Socke treten der krankhaften Winkelneigung der großen Zehe entgegen.
- **Besserer Tragekomfort** im Schuh durch die Reduzierung der Reibung an der entzündeten Stelle (Bursitis).
- **Wirkt aktiv:** Die unterschiedliche Verarbeitung der Fasern und Garne wirken bei Bewegung im Einklang mit dem Fuß. Heirdurch wird der Fuß massiert, die Mikrozirkulation angeregt, der Lymphrücklauf begünstigt sowie die Muskulatur gestrafft.
- **Hilft dem Fuß,** sowohl im Ruhezustand als auch beim Gehen seine natürliche Form beizubehalten. Hilfreich für Personen, welche oft stehen, gerne laufen oder gehen. Ermöglicht eine gute Transpiration und Bekämpft dank der **antibakteriellen Sanitized®** Technik die Bildung von Bakterien, welche zu Fußgeruch führen können.

Eine Socke als Freund

by Paolo Scettri

Ein Medizinprodukt CE
Brevetto IT 1378837
Patent Pending EP 08720252, US 12/526546





Alluce Valgo Solution®

Die Entwicklung dieser Socke beruht auf jahrelanger Erfahrung im Bereich funktioneller Bandagen und Strümpfe. Auf diese Weise ist die Socke **Alluce Valgo Solution®** entstanden. Technologisch entwickelt durch die Verbindung von Strechlycra/Nylon/Baumwollgarn und unter Berücksichtigung der natürlichen Kraftvektoren der Muskulatur und der Fußgelenke.



Der Winkelbereich der großen Zehe ist großzügig bemessen, so dass die Zehe mehr Platz zum Bewegen hat.

Die Zehen des Mittelfußbereiches werden separat geführt. Dieses ermöglicht einen umfassenden Schutz des Zehengroßgelenkes und somit die Vermeidung von schmerzhafter Bursitis.



Für Ihre Bedürfnisse

Unisex-Modelle:

Minimax Modelle:
Verfügbare Farben:
Weiß und Schwarz
Größen: S-M-L



Kurz-Mittel-Lang
Verfügbare Farben:
Weiß und Schwarz
Größen:
34/36 - 37/39
40/42 - 43/45



Zehenspitze ①: Baumwolle + Lycra mit unterschiedlichen Verarbeitungseigenschaften, berücksichtigt die natürlichen Kraftvektoren der Muskulatur und der Fußgelenke, behindert die Abwinkelung der großen Zehe.

Gelenkbereich ②: Umhüllt den Mittelfußbereich und verstärkt den Zehenbereich ①, indem die Zugkräfte auf den großen Zehen und auf die Muskulatur des Fußes wirken.

Spannbereich ③: Weiche Strechbaumwolle + weiches Strechnylon mit unterschiedlich dichten Bearbeitungslinien, welche dazu entwickelt wurden, den Lymphrücklauf optimal zu beeinflussen.

Ferse ④: 100% Baumwolle, klassische, weiche Verarbeitung.

Gebrauchsanleitungen und wichtige Hinweise

Als Einstieg empfehlen wir eine Anwendung von etwa 2-3 Stunden täglich. Nach einer Gewöhnungszeit von ca. 3 Wochen können Sie die Strümpfe den ganzen Tag tragen. Gegenanzeigen sind nicht bekannt. Es kann jedoch zu Beginn der Therapie zu leichte Schmerzen in der Fuß- oder Wadenmuskulatur kommen. Die Socke bewirkt auch bei einem gesunden Fuß eine Lymphdrainage. Im Falle einer starken Rötung oder anhaltenden Schmerzen sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt.

Material - Zusammensetzung:

60% Baumwolle
33% Polyamid
7% Lycra



prodotto 100% italiano

Imported by: